

## INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

### GELURI CU ULTRASUNET: AQUAULTRA BASIC, AQUAULTRA CLEAR, AQUAULTRA ALOE, HYPERSCAN 100, AQUA-LUB

Gelurile cu ultrasunete au fost concepute pentru a fi utilizate în fizioterapie cu ultrasunete și diagnosticare. Gelul pentru ultrasunete garantează o transmisie perfectă a undelor ultrasunete.

Solubil în apă Nu conține substanțe grase, Ușor de îndepărtat nu patează, nu irită pielea, inodor. Nu conține principii active care ar putea deteriora sondele echipamentului ecografic. lit nu conține sare.

AquaUltra basic este albastru, AquaUltra clear este incolor și AquaUltra aloe conține aloe sugerată pentru pielea sensibilă. HyperScan100 incolor crește capacitatea de reflexie a ultrasunetelor. Gelul cu ultrasunete Aqua-LUB are o vâscozitate mai mică.

#### INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE

- \* Gelul este gata de utilizare
- \* Curățați și degresați pielea pacientului.
- \* Aplicați cantitatea dorită de gel
- \* Conectați și utilizați echipamentul și sondele urmând instrucțiunile furnizate de producători.
- După procedură, îndepărtați toate reziduurile gelului cu un prosop de hârtie sau cu un tifon umezit cu apă.
- \* Opriteți utilizarea gelului pentru pacienții hipersensibili, dacă apar reacții cutanate.

#### AVERTIZĂRI

- Numai pentru utilizare externă.
- Produsul nu este steril.
- Nu aplicați gel pe pielea afectată de abraziuni, eritem sau răni.
- Închideți flaconul după utilizare.
- \* Poate provoca iritații sau înroșiri la persoanele alergice.
- \* Contactul cu ochii poate provoca iritații.
- \* Analistul cu pielea sensibilă trebuie să poarte mănuși de protecție în timpul utilizării.
- \* Nu utilizați gelul după data de „utilizare până la” pe sticlă.
- \* În cazul în care ambalajul conține o sticlă reîncărcabilă goală etichetată, trebuie completat numai produsul cu numele de pe etichetă

INGREDIENTE: aqua, carbomer, sodium hydroxide, EDTA, phenoxyethanol, ethylhexylglycerin,  
(incolor sau E 131 sau aloe)

#### AMBALARE

Cutie cu 50 de sticle de 260 g.  
Cutie cu 24 de sticle, de 500 g.  
Cutie cu 10 sticle de 1000 g.  
Cutie cu 4 cubitainere de 5000 g  
Cutie cu 4 canistre de 5000 g

#### DATA PRIVIND ELIMINAREA DESEURILOR



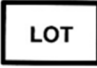









Produs, deșeuri: Produsele chimice trebuie eliminate în conformitate cu reglementările naționale respective.  
Ambalajele trebuie eliminate în conformitate cu specificul țării.

#### DEPOZITARE

Temperatura: + 10 ° C ÷ + 30 ° C - Umiditate relativă: 30% ÷ 75%. Păstrați recipientul bine închis, departe de lumina soarelui și de sursele de radiații UV.

DATA EXPIRARII: 36 luni de la data producției: utilizați 3 luni după deschidere.

01.02.2021 V 02

	Producător		Limita de temperatură		Cod lot		Atenție
	Manual de utilizare		ambalaje din polietilenă		Folosiți până la dată		Nu refolosiți
	fără steril		departe de UV		Aparat medical		

**Ultragel Hungary 2000 Kft.**

✉ 1023 Budapest Bécsi út 4.  
☎ [info@ultragel.hu](mailto:info@ultragel.hu)

☎ +36 1 278 3050  
🌐 [www.ultragel.hu](http://www.ultragel.hu)